

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, figyelmesen olvassd el a használati útmutatót, amely fontos információkat tartalmaz a WellStepp® Kids orvostechnikai eszköz használatáról. A WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg ortopéd szakorvosok és gyógytornászok által ajánlott fejlesztő eszköz kisgyermek részére.

Orvosi műszaki ismertető

A WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg az életvitel fejlesztésére szolgáló eszköz, mellyel a természeti környezet leképezését valósítjuk meg. Segítségével mesterségesen hozzuk létre az emberi test instabil állapotát, arra ösztönözve a mélyizom-ízületi érzékeléseket, hogy tudat alatti mozgásokon keresztül, izom feszítéssel stabilizálják a test pillanatnyi instabil állapotát.

A WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg hatása

- erősíti a talpboltozat izomzatát
- segít megelőzni a lúdtalp kialakulását
- javítja a testtartást
- fejleszti az egyensúlyérzéklet
- támogatja az egészséges idegrendszeri fejlődést
- javítja az érzékelőképességet
- fejleszti a finommotoros mozgást

A termék leírása

A WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg kavicsos tengerpartot idéző alakzatainak és kellemes felületének köszönhetően vidám játékká teszi a gyerekek talpboltozat izomzatának erősítését. Különleges kialakítása kényelmes és hatékony megoldást jelent a gyermekkorban kialakuló, akár élethosszig tartó ortopéd-jellegű rendellenességek megelőzésére. Rendszeres használatával megelőzhető és kezelhető a lúdtalp és az egyéb panaszok kialakulása, elősegíthető továbbá az egészséges testtartás megőrzése és az idegrendszer megfelelő fejlődése.

A WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg otthoni és intézményi környezetben egyaránt használható. Alkalmazása nem igényel speciális szaktudást, azonban a megfelelő eredmény elérése érdekében ajánljuk a következő tanácsok megfogadását.

Bár a termék elnevezésében szerepel a 'sensory' szó, magában a termékben nincsen semmilyen szenzor, a megjelölés arra vonatkozik, hogy a terméken szenzoros tornagyakorlatokat lehet végezni.

A termék nem gyerekjáték, az kifejezetten gimnasztikai fejlesztő gyakorlatok végzésére szolgál.

A termék teljesítőképessége szempontjából a termék leírását a használati útmutató egészével együtt kell értelmezni.

Ajánlott gyakorlatok a WellStepp® Kids fejlesztő szőnyeghez

Az alábbi QR kód telefon vagy táblagép segítségével egyaránt beolvasható, majd a megjelenő linkre kattintva a weboldalunk nyílik meg.

Honlapunkon megtalálhatók a gyógytornászok által kidolgozott játékos gyakorlatsorok a WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg hatékony használatához.

Honlapunk: www.wellstepp.eu



A biztonságos és eredményes használat érdekében betartandó előírások

A termék használata minden alkalommal szülői felügyelet mellett történjen.

A szenzoros fejlesztő szőnyeg beltéri használatra lett tervezve.

A külső környezeti hatások befolyásolhatják a hosszú távú minőségi és esztétikai tulajdonságokat. A termék az optimális eredmény és biztonságos használat érdekében egyenletes talajon történő használata ajánlott, lehetőség szerint minél kevésbé csúszós felületen.

A termék nem tartalmaz egészségre káros anyagokat, de a gyermekek kisebb darabokat ki tudnak belőle harapni, ami szélsőséges esetben fulladáshoz vezethet. Figyeljünk, hogy a gyermek/gyermekek ne vegyék a szájukba és ne nyalogassák a szőnyeget.

Ajánlott: 1 éves kortól

Ellenjavallatok

A WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg használata nem javasolt amennyiben szakorvos/gyógytornász véleménye alapján a gyermek olyan mozgásszervi panaszokkal küzd, melyek során nem ajánlott vagy nem kivitelezhető az önálló mozgással egybekötött mesterséges instabilitást használó egészségfejlesztés.

Egészségügyi szakemberrel való konzultáció szükségessége

Amennyiben az interneten hozzáférhetővé tett gyakorlatok megtekintésére nincs lehetőség vagy a gyakorlatok értelmezésében probléma merül fel, úgy a helyes gyakorlatok végzése érdekében javasolt egészségügyi szakemberrel (ortopéd orvos, gyógytornász) való konzultáció.

Tisztítás és tárolás

A termék nedves ronggyal egyszerűen tisztítható, használat előtt meg kell várni, hogy a szőnyeg teljesen megszáradjon. Napi használat esetén, kéthetente finom mosószeres/samponos/öblítőszeres vízzel, szivaccsal töröljük át a termék mindkét oldalát, ezt követően hagyjuk megszáradni. Normál szobahőmérsékleten, a szállítási méretre hajtva tároljuk.

Javasoljuk a szőnyeget lehetőség szerint eredeti dobozában tárolni. Az anyag ugyan hosszú távon is formatartó, azonban huzamosabb ideig tartó erő hatására el tud deformálódni, ami a használati értéket ronthatja.

Technikai információ

Mérete: 58 x 154 cm

Anyaga: 100% habosított polietilén

A termék emberi fogyasztásra nem alkalmas. Rendeltetésszerű használat esetén egészségügyi veszélyt nem jelent, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz.

Gyártja:

Polifoam Kft.

1097 Budapest, Táblás u. 34/A.

Származási hely: EU

A használati útmutató kiadásának /utolsó frissítésének dátuma:
2023. április

A csomagoláson látható szimbólumok jelentése



A termék gyártása során 100%-ban megújuló erőforrásból származó áram került felhasználásra.



Az ikon a termék gyártási sorozatszámát jelöli.



Az ikon a használati utasítás elolvasására hívja fel a figyelmet.



A jelölés igazolja, hogy a forgalmazott terméket a gyártó megvizsgálta, és az megfelel az uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak.

Gyártói nyilatkozat

A Polifoam Kft. (1097 Budapest, Táblás u. 34/A.) nyilatkozik, hogy jelen nyilatkozatot mint gyártó, az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745. sz. Rendelete (2017.04.05., a továbbiakban: R.) IV. sz. melléklete szerint a saját kizárólagos felelőssége mellett adja ki.

A Polifoam Kft. mint gyártó nyilatkozik, hogy a WellStepp® Kids szenzoros fejlesztő szőnyeg gyermekek részére termék I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz. A Társaság a regisztrációs kötelezettségének a termék tekintetében és gazdasági szereplőként is eleget tett.

A Polifoam Kft. nyilatkozik továbbá, hogy az általa gyártott eszköz megfelel a R I. melléklete szerinti biztonságosságra és a teljesítőképességre vonatkozó általános követelményeknek, a kialakítására és gyártására vonatkozó követelményeknek, valamint az eszközhez mellékelte információkra vonatkozó követelményeknek, emellett rendelkezik a R. II. melléklete szerinti Műszaki dokumentációval, illetve a R. III. melléklete szerinti, A forgalomba hozatal utáni felügyeletre vonatkozó műszaki dokumentációval.

A termék átadását követően, a használat időtartama alatt az eszköz használatával kapcsolatban bekövetkező súlyos, váratlan esemény bekövetkeztét követően a Polifoam Kft.-nek mint az eszköz gyártójának jelentéstételi kötelezettsége van az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYÉI e-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu) felé.